

1.



Ein Päckchen Nasenspülsalz ins Wasser geben.

2.



400 ml Wasser mit einer Temperatur von etwa 37,6°C und Salz in einer Flasche zubereiten.

3.




Die Kappe mit dem Schlauch auf dem Gefäß verschließen. Die Nasendusche leicht schütteln, damit sich die Mischung auflöst.


4.



Den Mund geöffnet lassen und den Atem nicht anhalten. Die Kappe an das rechte Nasenloch anlegen und den Flaschenboden drücken, bis die Lösung aus dem anderen Nasenloch bzw. aus dem Mund ausläuft.

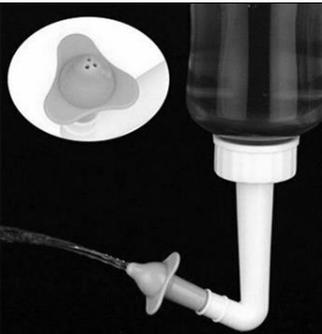

Für Kinder (Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet)

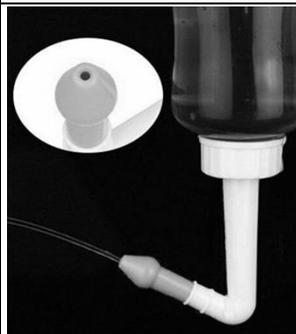

Für Erwachsene

Das Produkt nicht länger als 5 Minuten pro Anwendung verwenden

Nach der Anwendung 5 Minuten lang nicht die Nase schnäuzen & mit einem Taschentuch vorsichtig das Wasser aus der Nasenhöhle drücken. Es wird eine regelmäßige Reinigung der Nasenhöhle empfohlen.

6695051

TRI International

Sourcing & Trading GmbH

Steinstraße 28

D-88339 Bad Waldsee