

1.



Versez un sachet de sel pour lavage nasal à mélanger à l'eau.

2.



Préparez 400 ml d'eau à une température de 37,6°C et versez-la sur le sel dans le flacon.

3.




Fermez le capuchon du flacon. Secouez doucement pour mélanger.


4.



Gardez la bouche ouverte et ne retenez pas votre respiration, placez l'embout nasal contre votre narine droite et appuyez sur le fond jusqu'à ce que la solution passe dans l'autre narine ou dans la bouche.

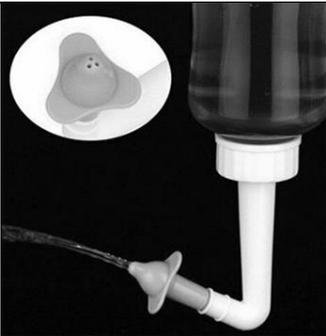

Pour les enfants (ne pas utiliser chez les enfants de moins de 8 ans.)

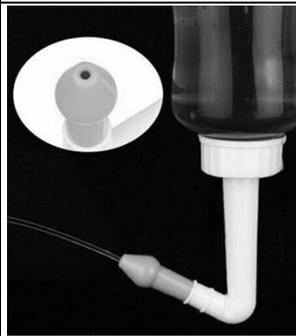

Pour les adultes

Ne pas utiliser ce produit durant plus de 5 minutes à chaque fois.

Ne vous mouchez pas durant les 5 minutes qui suivent l'utilisation et utilisez un mouchoir pour essuyer soigneusement le surplus qui coulerait de votre nez.

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement vos cavités nasales.

**6695051**

TRI International

Sourcing & Trading GmbH

Steinstraße 28

D-88339 Bad Waldsee