

1.



Doe de inhoud van een zakje nasaal spoelzout in de fles.

2.



Giet 400 ml water met een temperatuur van ca. 37,6°C bij het zout in de fles.

3.




Doe de dop erop. Schud de fles voorzichtig zodat het zout oplost.


4.



Houd uw mond open en houd uw adem niet in. Plaats het opzetstuk tegen uw rechter neusgat, zodat het goed aansluit. Druk op de onderkant van de fles tot de oplossing uit uw andere neusgat of uit uw mond komt.

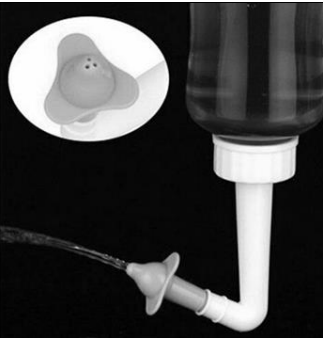

Voor kinderen (niet geschikt voor kinderen onder de 8.)

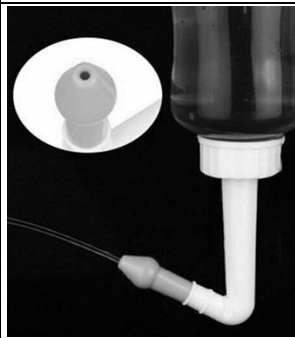

Voor volwassenen

Gebruik dit product niet langer dan 5 minuten achter elkaar

Snuit uw neus niet binnen 5 minuten na gebruik & gebruik een tissue om het water voorzichtig uit de neusholte te verwijderen.

Tip: reinig uw neusholte regelmatig.

6695051

TRI International

Sourcing & Trading GmbH

Steinstraße 28

D-88339 Bad Waldsee